


## **Czyszczenie, odkażanie i przechowywanie**

Pomiędzy zastosowaniami u każdego kolejnego pacjenta stetoskop należy czyścić ściereczką nasączoną 70% alkoholem izopropylowym lub jednorazową ściereczką nasączoną wodą z mydłem. Do czyszczenia stetoskopu w celu usunięcia materiału organicznego najlepiej używać jednorazowych ściereczek.

Do odkażania stetoskopu można używać 2% roztworu wybielacza. Stetoskopy zawierające czerwone barwniki w kolorze przewodów (burgund, różowy, śliwkowy, brzoskwiniowy, malinowy, pomarańczowy itd.) ulegają jednak nieznacznemu odbarwieniu po wystawieniu na działanie wybielacza. Ze względu na destrukcyjne działanie wybielacza należy używać wyłącznie roztworu wybielacza w ograniczonym zakresie i/lub tylko jeśli jest to konieczne.

Membrany dwutonowe, „ciepłą” obwódkę lejka oraz oliwki można zdejmować w celu ich dokładnego wyczyszczenia (przed ponownym zmontowaniem należy się upewnić, że wszystkie części i powierzchnie są suche). Aby zdjąć oliwki z zestawu słuchawkowego, należy je pociągnąć pewnym ruchem. W celu zamocowania oliwek należy pewnym ruchem wsunąć mniejszą część oliwki na douszny przewód słuchawkowy do momentu jej całkowitego osadzenia na miejscu.

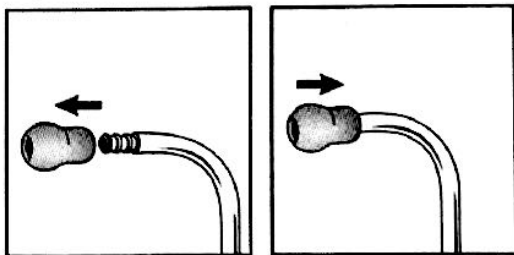

Stetoskopu nie należy zanurzać w żadnych płynach. Stetoskopu nie należy poddawać żadnemu procesowi sterylizacji.

Unikać przechowywania stetoskopu w warunkach skrajnie wysokiej temperatury.

## **Obsługa serwisowa i program gwarancyjny dla stetoskopu Littmann**

Prosimy zarejestrować swój stetoskop online, pod adresem: <http://www.littmann.com/warranty-registration>

Stetoskop Littmann Classic III podlega gwarancji na dowolną wadę materiałową lub produkcyjną przez okres pięciu (5) lat. W ramach okresu gwarancyjnego naprawy będą dokonywane bezpłatnie po zwróceniu stetoskopu firmie 3M poza przypadkami jednoznacznych nadużyć lub przypadkowego uszkodzenia.

W sprawach związanych z czynnościami serwisowymi i naprawą na terenie Stanów Zjednoczonych prosimy odwiedzić naszą witrynę internetową pod adresem [www.littmann.com/service](http://www.littmann.com/service) lub zadzwonić pod numer telefonu: 1-800-292-6298. W celu uzyskania informacji kontaktowych dotyczących lokalnej siedziby firmy 3M poza terenem Stanów Zjednoczonych prosimy odwiedzić naszą witrynę internetową pod adresem [www.littmann.com](http://www.littmann.com).

3M, Littmann, L Littmann logo, L i Classic III są znakami towarowymi firmy 3M.

Urządzenie stosowane na licencji w Kanadzie.  
© 2015, 3M. Wszelkie prawa zastrzeżone.