

KLUCZ DO ODBLOKOWANIA SZERSZYCH PERSPEKTYW TO TECHNIKA

Oto kilka wskazówek dotyczących obsługi naszych najnowszych otoskopów **Welch Allyn MacroView**.

JAK USTAWIĆ OSTROŚĆ W OTOSKOPIE MACROVIEW?

Nasza najnowsza konstrukcja charakteryzuje się zwiększoną głębią ostrości i polem wyraźnej ostrości, co eliminuje konieczność ręcznej regulacji ostrości. Jeśli nosisz okulary, pozostaw je na nosie podczas badania, aby uzyskać jak najostrejszy obraz.

JAK UZYSKAĆ SZERSZY WIDOK PODCZAS BADANIA?

Trzymając oko blisko strony urządzenia przeznaczonej Dla lekarza, w odległości nie większej niż 1 cal, można uzyskać 3-krotnie szerszy obszar widzenia. Zwiększenie odległości spowoduje zmniejszenie obszaru widzenia.



CO ZROBIĆ, JEŚLI OBRAZ JEST NIEOSTRY?

Upewnij się, że końcówka jest wystarczająco głęboko włożona do kanału słuchowego pacjenta. Nie daj się zwieść dodatkowemu powiększeniu i nie myśl, że nie musisz wprowadzać końcówki tak głęboko, jak w przypadku otoskopu o mniejszym powiększeniu.



Standardowy otoskop

3X WIĘKSZY OBSZAR WIDZENIA

2,5X WIĘKSZE POWIĘKSZENIE



MacroView Otoskop

DODAJ CYFROWĄ FUNKCJĘ PRZECHWYTYWANIA OBRAZU

Nasz otoskop **MacroView Plus** pozwala szybko przejść od badania optycznego do cyfrowego przechwytywania obrazów, rozszerzając możliwości użytkownika. Dzięki naszemu systemowi **iExaminer** i bezpłatnej aplikacji **iExaminer Pro** można zapisywać i udostępniać obrazy uszu w celu śledzenia, analizowania trendów i łatwego konsultowania się ze specjalistami.

ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!



Hillrom™



Siedziba i biuro obsługi:
ul. Poplińskich 5A/3
61-573 Poznań

Kontakt telefoniczny:
tel.: 61 223 23 90
tel.: 61 835 49 79

Kontakt mailowy:
info@medica91.com
manager@medica91.com