



Zobaczysz więcej. Zobaczysz dokładniej. Zobaczysz wyraźniej.

Tylko za pomocą nowego otoskopu Welch Allyn - MacroView™.

MacroView™, nowy otoskop firmy Welch Allyn na zawsze zmieni sposób, w jaki badasz ucho — nie zmieniając metody pracy. Ten wziernik nowej generacji wyposażono w zaawansowany system optyczny, który zapewnia uzyskanie większego powiększenia, umożliwiając jednocześnie wgląd w niemal całą błonę bębenkową — praktycznie eliminując konieczność przemieszczania wziernika. Co więcej, dzięki systemowi optycznemu ułatwiającemu zogniskowanie, otoskop MacroView umożliwia poszerzenie zakresu wziernikowania, badanie złogów woskowiny, lokalizację płynu w uchu środkowym, a nawet przeprowadzanie badania ucha bez okularów. Podsumowując: otoskop MacroView daje szerszy, dokładniejszy, ostrzejszy obraz ucha — umożliwiając szybsze i dokładniejszej prowadzenie codziennych badań uszu.



Umożliwia wgląd w niemal całą błonę bębenkową

Zalety otoskopu Welch Allyn MacroView:

- Dwukrotnie większe pole widzenia
- Powiększenie o 30% większe niż w tradycyjnym otoskopie
- Obrazowanie niemal całej błony bębenkowej
- Lepsza przejrzystość i określenie punktów orientacyjnych
- Ulepszony system oświetlenia
- Możliwość dostosowania ostrości do zmiennej długości przewodu słuchowego lub oczu dalekowidza
- Konstrukcja głowicy umożliwiająca stabilne zamocowanie wziernika i wyrzucenie go jednym przyciśnięciem

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Autoryzowany serwis :
Medica 91 Sp.j.
ul. Poplińskich 5A/3
61-326 Poznań
tel. +48 (0)61 835 49 79
fax. +48 (0)61 833 29 56

UWAGA!


Używaj zawsze oryginalnych części od producenta Welch Allyn oraz postępuj zgodnie z instrukcją.

Instrukcja obsługi :

1. Dopasować głowicę otoskopu do rękojeści jonowo-litowej i przekręcić zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara.



2. Ustawianie pola widzenia:
 - pozycja zero – zgodnie z poziomą, zieloną linią na pokrętle z boku głowicy;
 - ustawienie ostrości – poruszać pokrętłem odpowiednio w górę lub w dół

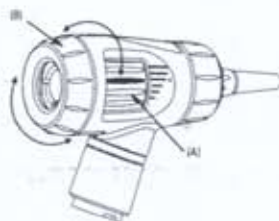

3. Mocowanie i usuwanie wzierników na końcówce głowicy :
 - nałożyć wziernik na końcówkę głowicy i przekręcić zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara;
 - po zakończeniu badania usunąć wziernik przekręcając w prawo pokrętło znajdujące się nad końcówką głowicy otoskopowej lub przekręcić wziernik w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara;



Zastosowanie iluminatora gardła :

1. Chwyć rękojęść lewą ręką powyżej zielonego włącznika tak aby objąć częściowo szyjkę głowicy;
2. Prawą ręką chwyć głowicę (powyżej srebrnego pierścienia) i przekręć delikatnie w lewo;
3. Głowica usunięta, iluminator gotowy do użycia:


Uwaga: Podczas badania iluminatorem gardła, uważać, aby nie dotknąć wnętrza jamy ustnej, ponieważ grozi to oparzeniem.



Mocowanie i usuwanie żarówki :

1. Odłączyć głowicę od rękojęści;
2. Od spodu głowicy znajduje się miejsce na żarówkę;

Uwaga : Nie usuwać żarówki bezpośrednio po zakończeniu pracy z otoskopem, grozi oparzeniem.

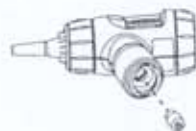

Czyszczenie urządzenia :

Samodzielnie czyścić jedynie głowicę oraz iluminator za pomocą suchej szmatki. Nie stosować substancji chemicznych, zawierających alkohol oraz płynu do soczewek, grozi uszkodzeniem urządzenia.

Wyposażenie dodatkowe :

- 23804 balon do otoskopii pneumatycznej
- 06500-U zapasowa żarówka
- 52432-U uniwersalne jednorazowe wzierniki uszne KleenSpec dziecięce
- 52434-U uniwersalne jednorazowe wzierniki uszne KleenSpec dla dorosłych
- 24302-U uniwersalne wzierniki uszne 2mm wielokrotnego użytku
- 24303-U uniwersalne wzierniki uszne 3mm wielokrotnego użytku
- 24304-U uniwersalne wzierniki uszne 4mm wielokrotnego użytku
- 24305-U uniwersalne wzierniki uszne 5mm wielokrotnego użytku
- 24400-U uniwersalny zestaw 4 wzierników usznych wielokrotnego użytku

Uwaga !

Urządzenie, wg zaleceń producenta, nie wymaga regularnego serwisowania, ani kalibrowania/wzorcowania.

Ewentualne przeglądy okresowe powinny być wykonywane zgodnie z zapisami systemu zarządzania jakością obowiązującymi w danej placówce.



Otoskop MacroView™
firmy Welch Allyn

Informacje nt. zamówienia

23820 Otoskop MacroView™ Welch Allyn z iluminatorem gardła

23810 Otoskop MacroView™ Welch Allyn