

Waga kolumnowa WUNDER model C201/202

Wybierając profesjonalną elektroniczną wagę kolumnową **WUNDER** model **C201** i **C202** dokonałeś zakupu urządzenia o wysokiej precyzji.

Od ponad 40 lat firma **WUNDER** wykorzystuje swoje doświadczenie służąc zdrowiu. Mechaniczna waga Wunder model **C201** i **C202** jest zgodna z normami obowiązującymi w szpitalach, klinikach i ośrodkach opieki medycznej. Wagi **C201** i **C202** są wyrobami medycznymi klasy LM z urządzeniem pomiarowym zgodnym z klasą precyzji III (zgodnie z normami 93/42 i 90/384 EWG).

Spis treści

1. SPECYFIKACJE OGÓLNE	2
2. BEZPIECZEŃSTWO	2
3. OPIS I ZAPLANOWANE ZASTOSOWANIE	2
4. DANE TECHNICZNE	3
5. MONTAŻ	3
6. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA	5
7. KONSERWACJA I WSPARCIE	7
8. ZGODNOŚĆ	7
9. TABLICZKI ZNAMIONOWE	7
10. WYRZUCANIE I USUWANIE	8
11. RĘKOJMIA	9
12. MONTAŻ I STOSOWANIE MECHANICZNEGO	
13. STADIOMETRU TELESKOPOWEGO (OPCJA)	10

1. SPECYFIKACJE OGÓLNE

UWAGA! Dokładnie przeczytać instrukcję przed użyciem przyrządu, ponieważ zawiera ona ważne informacje dotyczące BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI.

Opisy i ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji nie są wiążące.

WUNDER zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wymaganych w celu ulepszenia przyrządu bez konieczności aktualizowania dokumentacji.

W sprawach wszelkich dodatkowych informacji dotyczących użytkowania produktu, konserwacji i pomocy dostępny jest nasz dział obsługi klienta.

Symbole:

W niniejszej instrukcji użyto następujących symboli:



URZĄDZENIE MEDYCZNE I KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA



URZĄDZENIE POMIAROWE



KLASA PRECYZJI



CERTYFIKAT GWARANCYJNY



UWAGA! UMIESZCZANE PRZED OPISEM PROCEDUR. NIEPRZESTRZEGANIE MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIA PRODUKTU



OSTRZEŻENIE! UMIESZCZANE PRZED OPISEM PROCEDUR. NIEPRZESTRZEGANIE MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIA PRODUKTU I / LUB URAZ OPERATORA LUB PACJENTA



ODPADY ZSEE

2. BEZPIECZEŃSTWO

Operatorzy muszą uważnie przeczytać instrukcję i postępować zgodnie z zawartymi w niej instrukcjami. Muszą także nauczyć się prawidłowych procedur użytkowania narzędzi oraz konserwacji.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za dowolne szkody bezpośrednie lub pośrednie, w tym utratę zysku i wszelkie inne szkody związane z prowadzoną działalnością biznesową, spowodowane wykorzystywaniem narzędzia, które nie jest zgodne z zaleceniami niniejszej instrukcji.

- Zachować tę instrukcję do wglądu na przyszłość i jako wsparcie przy szkoleniu personelu.
- Nie przeciążać urządzenia ponad jego maksymalne obciążenie
- Nie obciążać w sposób gwałtowny.
- Nie należy naciskać przycisków przy użyciu ostrych lub tnących przedmiotów.
- Nie próbować otwierać narzędzia.
- Nie usuwać plomb na urządzeniu.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
- Regularnie wykonywać czynności konserwacyjne i przeglądy metryczne.

3. OPIS I ZAPLANOWANE ZASTOSOWANIE

Narzędzie jest przeznaczone do ważenia osób w instytucjach opieki medycznej w ogólnych celach diagnostycznych.

Środowisko użytkowania: szpitale i przychodnie lekarskie. Pomieszczenie, w którym urządzenie jest montowane musi być wyposażone w sieć elektryczną zgodną z obowiązującymi przepisami. Zawsze używać urządzenia ważącego w miejscu, które nie jest ono narażone na zakłócenia magnetyczne.

Osoby upoważnione do wykorzystywania produktu: operatorzy i lekarze, którzy są zaznajomieni z produktem.

Nadzór i odpowiedzialność: narzędzie musi być użytkowane wyłącznie pod nadzorem wykwalifikowanego lekarza lub wykwalifikowanego personelu odpowiedzialnego za konserwację i okresowe kontrole.

Ograniczenia w użytkowaniu: wyrób medyczny może być używany wyłącznie w sposób opisany w instrukcji.

4. DANE TECHNICZNE

Model	C201 kolumnowy	C202 kolumnowy
Udźwig	100-200g/ 450lb	220 kg/ 485lb
Kategoria	50-100g	100 g
Producent	Wunder Sa.bi.srl Trezzo S/Adda Mediolan Włochy	
Aprobata OIML	Klasa III	
Jednostka miary	kg/ lb	
Temperatura pracy	0°C - 35°C	
Akcesoria w zestawie	Stadiometr teleskopowy 60-210cm / 24-84 cali 5mm/ 0,25 cala	

5. MONTAŻ

Opakowanie zawiera:


1. Kolumna i głowica z systemem ważącym
2. Pręt kotwiący kolumnę (pręt wewnątrz kolumny)
3. Podstawa z platformą gumową
4. Teleskopowy stadiometr do pomiar wzrostu
5. Kółka do transportu
6. Zestaw montażowy 8 różnych śrub i 1 klucz
7. Instrukcja obsługi

ETAP 1: Montaż podstawy kolumny

UWAGA! Podczas przechylania podstawa i platforma muszą znajdować się blisko siebie, aby / zapobiec wystawianiu tulei dźwigni.

Umieścić kolumnę wagi na stole w położeniu poziomym (Rys. 3)


1. Rozwiązać kable blokujące dźwignie.
 2. Wyjąć pręt kotwiący przy pomocy klucza i zaczepić dłuższy bok dźwigni, żeby połączyć go z prętem kotwiącym kolumny (Rys. 3-1)
- Ostrożnie umieścić wagę na ziemi.

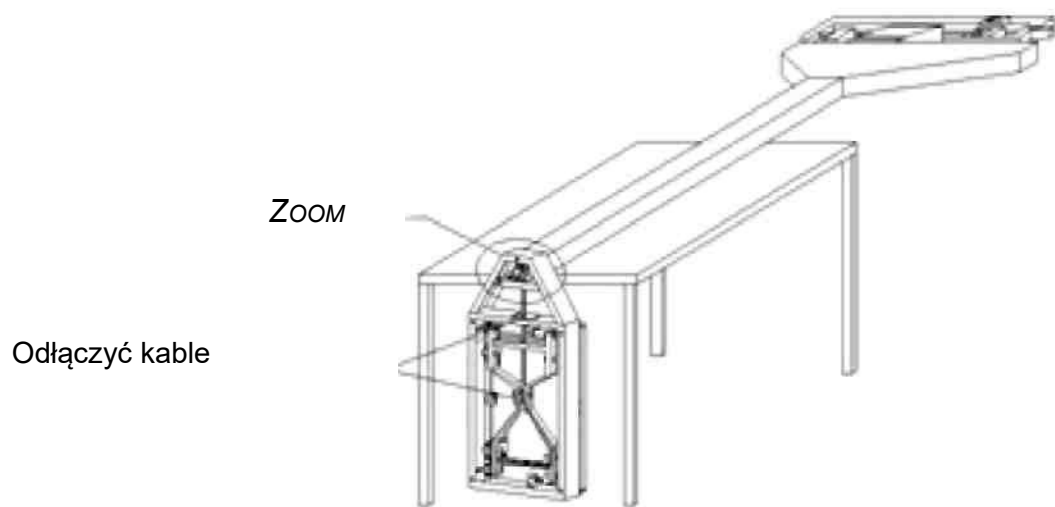

Połączenie między wagowskazem a długą dźwignią


ETAP 2: Połączenie pręta kotwiącego kolumny i dźwigni podstawy

Połączyć pręt kotwiący kolumny z długą dźwignią za pomocą klucza hakowego dostarczonego w opakowaniu (RYS. 3-1/ 3-2/ 3-3)

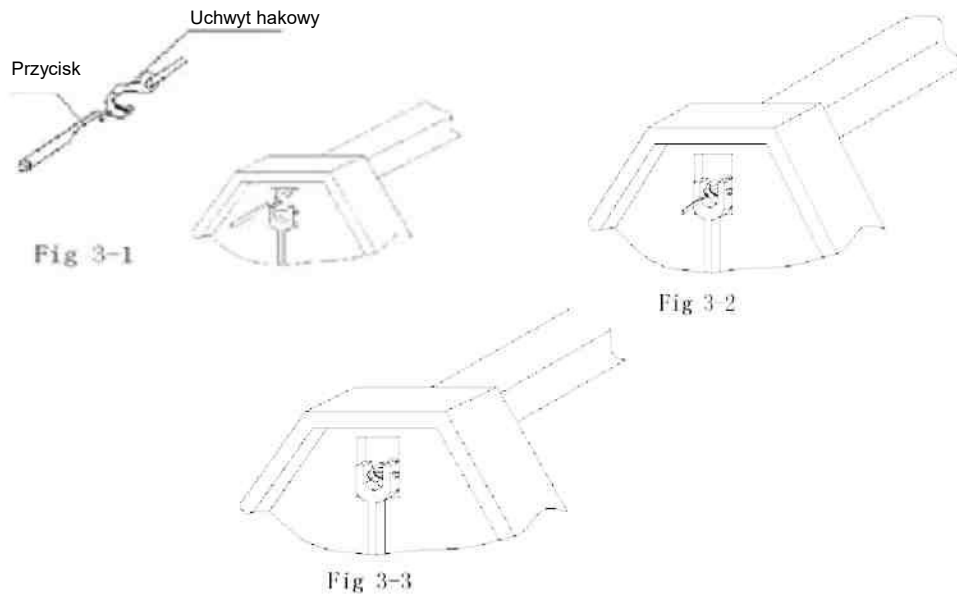

ETAP 3: Mocowanie kolumny / podstawy (platforma)


Umieścić wagę na podłożu i zamocować kolumnę do podstawy za pomocą dostarczonych śrub.

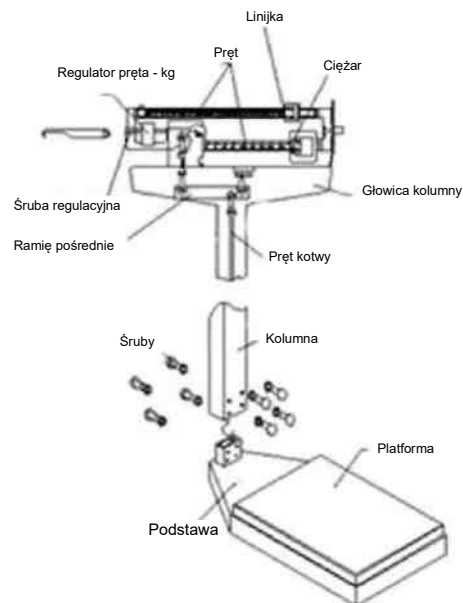

6. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Umieścić narzędzie na płaskiej powierzchni, aby zapewnić precyzję pomiaru ciężaru
2. Sprawdzić, czy wskaźnik odczytu wagi jest ustawiony na zero.
3. Wejść na podstawę (platformę) wagi.
4. Wybrać "Odważnik kg" do pomiaru w kg i "Odważnik 100g" do pomiaru 100g.
5. Kiedy pręt wyważający pozostaje zawieszony, a wskaźnik znajduje się na czerwonym znaku, waga jest prawidłowa.
6. Odczytać wagę za pomocą dwóch odważników: kg i 100g.

7. Zejść powoli z platformy i ustawić oba odważniki na zero.

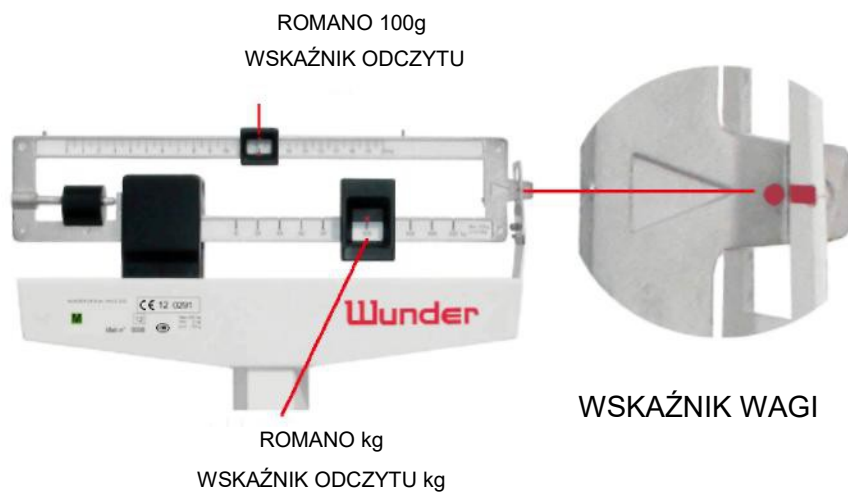

7. KONSERWACJA I WSPARCIE

OSTRZEŻENIE! Zaleca się regularne zabiegi konserwacyjne. Częstotliwość powinna zostać określona przez użytkownika.

Czynności konserwacyjne muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z centrum obsługi klienta **WUNDER**.

Aby zapewnić lepsze i dłuższe użytkowanie produktu zaleca się regularne dokładne czyszczenie.

Narzędzie należy czyścić za pomocą miękkiej ściereczki zwilżonej wodą lub neutralnym środkiem czyszczącym.

Unikać użycia rozpuszczalników lub produktów ściernych.

W przypadku, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie z terminala i przykryć akumulator, aby uniknąć uszkodzenia.

Podczas transportu, upewnić się, że narzędzie nie jest narażone na uderzenia lub duży nacisk mechaniczny.

Prosimy o kontakt ze sprzedawcą w sprawie napraw i wsparcia.

8. ZGODNOŚĆ

URZĄDZENIE DO WAŻENIA WUNDER: MODEL C201/C202



Zaświadczamy, że narzędzie zostało sprawdzone i przeszło testy funkcjonalne.

Jest ono zgodny z następującymi normami i przepisami:

2009/23/WE; 93/42/WE; EN45501

9. TABLICZKI ZNAMIONOWE

UWAGA! Tabliczka znamionowa zawiera wskazanie roku produkcji, np. 13-2013 i tak dalej.

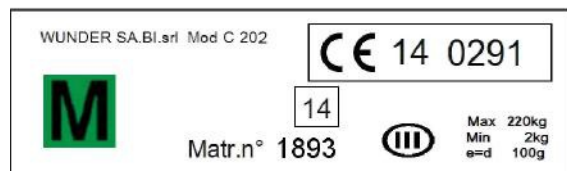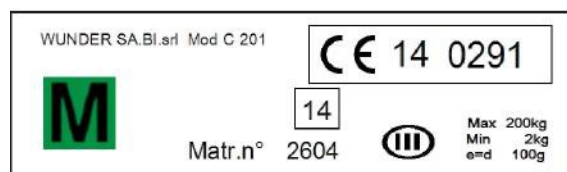

10. WYRZUCANIE I USUWANIE

Magazynowanie

W przypadku długotrwałego magazynowania części, które mogą ulec uszkodzeniu przez kurz powinny być zabezpieczone.

Usuwanie

Kiedy przedmiot nie jest już używany, musi zostać pozbawione możliwości użytkowania. Części niebezpieczne muszą zostać zabezpieczone.

Usuwanie UE 2002/96/WE

Produkt ten jest zgodny z Dyrektywą UE 2002/96/WE Symbol przekreślonego kosz na śmieci oznacza, że produkt, po zakończeniu swojego cyklu życia, nie może być traktowany tak jak inne odpady domowe, ale powinien zostać zabrany do centrum recyklingu specjalizującego się w sprzęcie elektronicznym lub zwrócony do sprzedawcy przy zakupie produktu podobnego. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe usunięcie produktu. Odpowiedni recykling, obróbka i utylizacja zgodna z zasadami ochrony środowiska zmniejszają negatywne skutki dla środowiska i zdrowia i promują recykling materiałów, z których produkt został wykonany. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dostępnych metod zbiórki, prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, w którym zakupiony został produkt.

Jako konsument, użytkownik jest zobowiązany przez prawo do zwracania wykorzystywanych lub zużytych baterii. Można dostarczyć baterie do punktów zbiórki publicznej w swoim mieście. Jest również możliwe oddanie ich do dowolnego sprzedawcy baterii posiadającego specjalne pojemniki. Sprzęt elektryczny i elektroniczny należy dostarczyć do specjalnych punktów zbiórki również w przypadku wyrzucania.

UWAGA: Poniższe symbole wskazują na obecność substancji niebezpiecznych

Baterie:

Pb Pb = baterie zawierające ołów

Cd Cd = baterie zawierające kadm

Hg Hg = Baterie zawierające rtęć

**UWAGA! Nie wyrzucać podzespołów elektrycznych i zużytych baterii do odpadów komunalnych
Dostarczyć baterie do dowolnego lokalnego punktu zbiórki.**

11. GWARANCJA

Niniejszy certyfikat powinien zostać zachowany do czasu wygaśnięcia gwarancji.

Musi zostać przedstawiony wraz z fakturą, paragonem fiskalnym, lub specyfikacją wysyłkową, podającymi nazwę sprzedawcy oraz datę zakupu w każdym przypadku, kiedy konieczna jest interwencja techniczna. W przypadku niezgodności, użytkownik nie będzie mógł skorzystać z jakiegokolwiek prawa gwarancyjnego.

Gwarancja rozpoczyna się od daty zakupu i jest ważna przez okres wskazany w obowiązującym katalogu/cenniku.

Gwarancja oznacza nieodpłatną wymianę lub naprawę, w określonych warunkach, elementów wyposażenia, które według uznania producenta, posiadają wady w chwili sprzedaży. Wunder zadecyduje, czy element zostanie naprawiony lub wymieniony.

Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń spowodowanych transportem, upadkami, zaniedbaniami lub ingerencją w sprzęt
- uszkodzeń wynikających z braku umiejętności użytkownika lub niewłaściwego użytkownika
- uszkodzeń, wynikających z nieodpowiedniej instalacji elektrycznej lub zmian wynikających z warunków środowiskowych, pogodowych lub innych
- uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu urządzenia oraz napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione
- interwencji na miejscu dotyczących regularnych kontroli lub domniemanych wad
- rutynowej konserwacji i wszystkiego, co można uznać za normalne zużycie wynikające z użytkownika

Interwencji można odmówić w przypadku, jeżeli narzędzie zostało w dowolny sposób zmienione lub przerobione

W przypadku interwencji na miejscu, użytkownik powinien uiścić stałą opłatę. Jeżeli urządzenie jest naprawiane w autoryzowanym centrum serwisowym Wunder, koszty i ewentualne ryzyko związane z transportem są ponoszone przez użytkownika.

Wunder nie ponosi odpowiedzialności za szkody o dowolnym charakterze, spowodowane bezpośrednio lub pośrednio w stosunku do osób, zwierząt lub przedmiotów, wynikające z nieprzestrzegania wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji lub z nieprawidłowego użytkownika.

W przypadku sporów, sądem właściwym jest Sąd w Bergamo (Włochy).

12. MONTAŻ I STOSOWANIE MECHANICZNEGO STADIOMETRU TELESKOPOWEGO (OPCJA)

Patrz RYS. 4, aby zapoznać się z instrukcją montażu stadiometru

<p>FIG.4: Umieścić wsporniki stadiometru w śrubach na kolumnie</p>	<p>FIG.4-1: Za pomocą dołączonego klucza wkręcić dwie śruby z łbem sześciokątnym, aby zamocować stadiometr do kolumny</p>	<p>FIG.4-1: stadiometr jest gotowy do użycia</p>




Stosowanie mechanicznego stadiometru teleskopowego

UWAGA! Do pomiaru wzrostu, pacjent musi stać na platformie wagi.

POMIAR POWYŻEJ 131 CM

	<p>Podnieść dźwignię zagłówka Umieść ją w pozycji poziomej</p>
	<p>Obniżyć pręt do chwili, aż dźwignia zagłówka dotknie głowy pacjenta. Wzrost można odczytać w punkcie 'A'</p>

POMIAR PONIŻEJ 131 CM

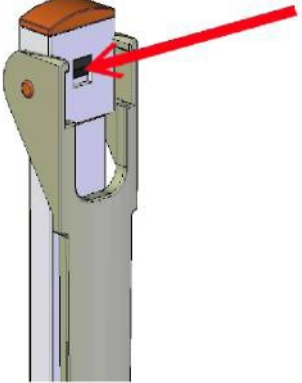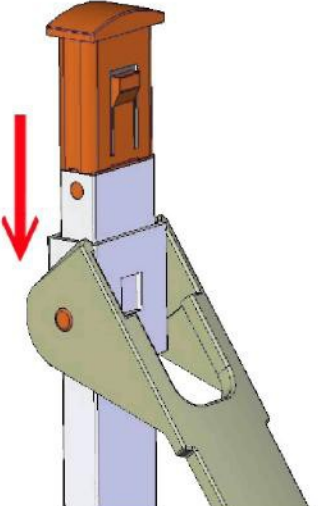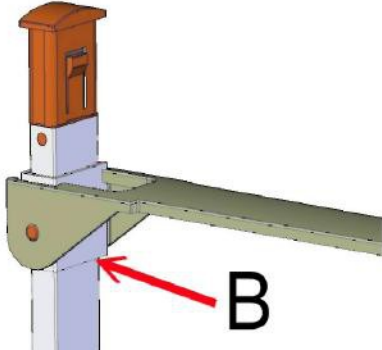	<p>Obniżyć dźwignię zagłówka i wcisnąć czarny przycisk centralnej blokady</p>
	<p>Przytrzymując wciśnięty przycisk blokady obniżyć dźwignię zagłówka</p>
	<p>Obniżyć pręt do chwili, aż dźwignia zagłówka dotknie głowy pacjenta. Wzrost można odczytać w punkcie 'B'</p>

Dystrybutor

Medica 91 Sp. J.
ul. Poplińskich 5A/3
61-573 Poznań
tel. 61 835 49 79
e-mail: info@medica91.com

www.medica91.com