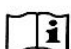


Podręcznik użytkownika stetoskopu Littmann® Classic III™ firmy 3M™

Gratulujemy zakupu nowego stetoskopu Littmann® Classic III™ firmy 3M™.

Stetoskop Littmann Classic III zapewnia wysoką czułość akustyczną oraz wyjątkową wszechstronność. Jego innowacyjna konstrukcja zawiera jednoelementową membranę dwutonową po każdej stronie głowicy; strony o większej powierzchni można używać w przypadku pacjentów dorosłych, natomiast strona o mniejszej powierzchni jest szczególnie użyteczna do diagnozowania dzieci. Dodatkowo, „pediatryczną” stronę głowicy można przekształcić w klasyczny lejek. W tym celu należy zdjąć membranę dwutonową i założyć „cieplą” obwódkę lejka dołączonej do zestawu. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.littmann.com.

Objaśnienie symboli


 Zapoznać się z instrukcją obsługi.

 Nie zawiera lateksu kauczuku naturalnego.

Instrukcja obsługi


Umieścić stetoskop w uszach

Zestaw słuchawkowy stetoskopu jest ustawiony pod kątem, aby zapewnić jego dostosowanie do anatomii typowego przewodu słuchowego i został skonstruowany w taki sposób, by zapewnić komfortowe i akustycznie szczelne dopasowanie. Umieszczając oliwki w kanałach słuchowych, należy je skierować ku przodowi.

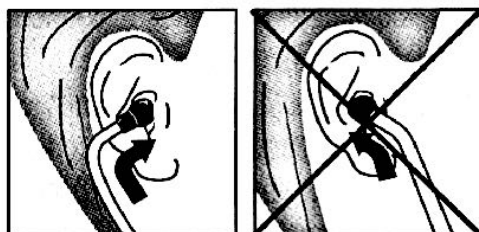


Dostosować nacisk zestawu słuchawkowego

W razie konieczności można dostosować nacisk zestawu słuchawkowego, aby zapewnić ich pewne, ale komfortowe zamocowanie w uszach użytkownika.

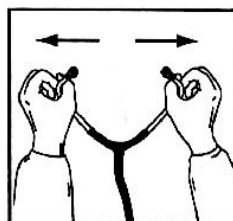

Aby zredukować nacisk sprężyn zestawu słuchawkowego, należy rozsunąć douszne przewody słuchawkowe od siebie. Czynność należy powtarzać do momentu uzyskania pożądanego nacisku.

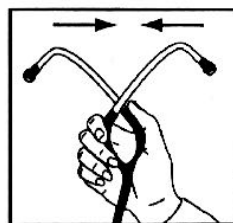

Aby zwiększyć nacisk sprężyn zestawu słuchawkowego, należy zsunąć douszne przewody słuchawkowe do siebie. Czynność należy powtarzać do momentu uzyskania pożądanego nacisku.