

## **Airmax™ Sport / Classic Instrukcja Stosowania**

Urządzenie medyczne dilator / rozszerzacz nosowy należy umyć wodą przed i po użyciu. W przypadku używania rozszerzacza do nosa Airmax™ po raz pierwszy zalecamy użycie lustra, aby ułatwić właściwe założenie urządzenia. Dilator nosowy Airmax™ jest prawidłowo umiejscowiony, gdy "nóżki" rozszerzają otwór nosowy i gdy "mostek łączący" dotyka przegrody nosowej. Patrz ilustracja obok.

Zaleca się stosowanie dilatora do nosa Airmax™ przez co najmniej 2 tygodnie w sposób ciągły, w tym czasie nos powinien przyzwyczać się do kształtu urządzenia Airmax™.



### **Instrukcje dotyczące czyszczenia**

Airmax™ można czyścić wodą i łagodnym mydłem. Każdy egzemplarz Airmax™ powinien być stosowany tylko przez jedną osobę, aby zapobiec przenoszeniu się chorób takich jak przeziębienie.

### **Uwaga**

Jeśli masz problemy z umieszczeniem Airmax™ w nosie, ponieważ nos nie jest symetryczny, nie powinieneś go stosować. Jeśli po umieszczeniu urządzenia nie zauważysz poprawy oddychania, radzimy zasięgnąć porady lekarza laryngologa. Jeśli po regularnym użyciu urządzenia do nosa Airmax™, Twój kanał nosa staje się podrażniony, może to być wynikiem reakcji alergicznej na medyczne tworzywo (medical grade plastic). Wówczas należy przerwać stosowanie i skontaktować się z lekarzem, jeśli stan się utrzymuje.

Urządzenie nosowe Airmax™ nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 12 lat. Chronić przed dziećmi, aby zapobiec zakrztuszeniu się dziecka.

Urządzenie nosowe Airmax™ przeznaczone jest do około 100 zastosowań.

Design and production in Holland

**DYSTRYBUTOR:** Medica 91 Sp. J. ul. Poplińskich 5A/3, 61-573 Poznań;  
tel. 061 835 49 79; [www.medica91.com](http://www.medica91.com), [info@medica91.com](mailto:info@medica91.com)