

Stetoskop JABES S-5

Jak połączyć się do inteligentnego telefonu.

Stetoskop elektroniczny JABES można podłączyć do SmartPhone z platformą Androida. Jeśli chcesz połączyć się z innymi tego typu urządzeniami, trzeba najpierw przetestować prawidłowe działanie samemu.



1. Podłącz kabel 2m (3.5 \emptyset) audio stereo z jeden strony do stetoskopu, z drugiej strony należy podłączyć się do czerwonej końcówki kabla z rozdzielaczem.



2. Podłącz kabel słuchawek do zielonej końcówki przewodu z rozdzielaczem



3. Podłącz kabel z rozdzielaczem do SmartPhone i uruchom aplikację RECORD (nagrywanie) w telefonie.



Nagrania audigramów należy odsłuchować na słuchawkach AUDIO. Głośniki zainstalowane w tabletach i smartphonach nie przenoszą pełnego spektrum dźwięku niezbędnego do prawidłowego diagnozowania.